	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	COD:	Revizia					
	CentoSwab – Kit de testare pentru SARS-CoV-2	IL. 01	0	1	2	3	4	5
		Ex. nr.	Ed. 1		Pag.: 1 / 2			

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile inainte de utilizare!

Utilizarea intentionata, indicatie si descrierea produsului

CentoSwab este un tampon format din 2 componente de plastic tratat cu oxid de etilena, fara lichid de stabilizare, pentru prelevare orofaringiana.

Componente:

1 x Tampon orofaringian

1 x Tub de colectare 5 mL


Depozitarea CentoSwab inainte de utilizare


Depozitarea kit-urilor nefolosite se face la temperatura camerei, intr-un loc uscat si fara expunere directa la lumina soarelui. Tamponul este destinat numai pentru o singura utilizare.

Termen de valabilitate: 1 an


Procedura de colectare a probei biologice

1. Spalati-va pe maini, 20-30 sec, inainte de a deschide kit-ul pentru inceperea recoltarii.
2. **Inainte cu 30 de minute de colectarea probei, nu mancati, nu beti, nu mestecati guma, nu va spalati pe dinti si nu clatiti gura cu niciun lichid.**
3. Dupa ce v-ati uscat mainile, deschideti kit-ul de recoltare in care veti gasi: 1 periuta alba de plastic cu coada lunga, un tub de plastic, un capac si un cod de bare autoadeziv. Codul de bare autoadeziv este extrem de important deoarece asigura legatura dintre proba si pacient. **Nu trebuie sa atingeti periuta!**
4. Cu ajutorul periutei colectati proba orofaringiana (din gat) prin frecarea usoara a ambelor parti ale acesteia de partea din spate a gatului. Respirati normal in timpul acestei operatiuni.
5. **Atentie! Nu atingeti periuta de nici o alta parte a gurii. Atingeti doar partea din spate a gatului.**
6. Dupa colectarea probei, introduceti imediat periuta in tubul de plastic fara a atinge peretii exteriori. Periuta de recoltare are prevazut un punct de rupere care trebuie folosit pentru a separa periuta cu proba orofaringiana de restul cozii de plastic. Indepartati restul cozii dupa rupere.

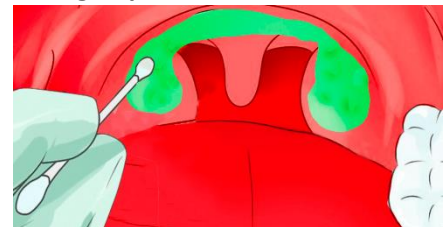

	INSTRUCTIUNE DE LUCRU	COD:	Revizia					
	CentoSwab – Kit de testare pentru SARS-CoV-2	IL. 01	0	1	2	3	4	5
		Ex. nr.	Ed. 1		Pag.: 2 / 2			

7. Inchideti tubul cu capacul primit in kit.
8. Aplicati eticheta cu codul de bare pe tub.

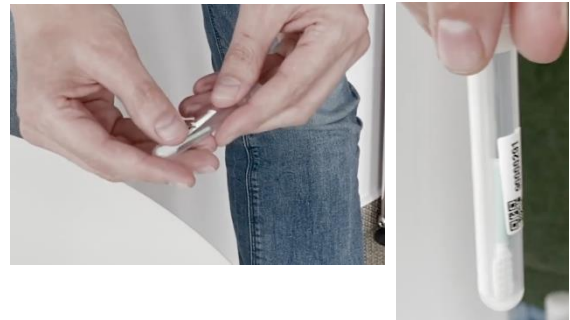

9. Plasati tubul in punga de plastic biohazard si sigilati punga.
10. Puneti documentele in buzunarul extern al pungii biohazard.



11. Punga biohazard, impreuna cu documentele, plasati-o in punga mare de plastic.

ATENTIE! Fiecare solicitare de testare are in partea dreapta, sus un cod care trebuie sa corespunda codului de pe tub. Fiecare punga biohazard trebuie sa contina proba si documentele unei singure persoane. Neconcordantele dintre codul de pe tub si cel de pe solicitarea de testare pot duce la intarzieri in prelucrarea probelor.